

FILMED
LABORATOIRES



LIP MENU |
ART FILLER®

OS SEUS LÁBIOS, A SUA ASSINATURA

Eu, & *os meus lábios!*

UM SORRISO, UM BEIJO, UMA PALAVRA...

Os nossos lábios transmitem os nossos sentimentos e emoções. Têm a capacidade de revelar as nossas intenções e humores, bem como o nosso temperamento e personalidade.

OS NOSSOS LÁBIOS SÃO ESSENCIAIS NAS RELAÇÕES HUMANAS

Tornam-nos únicos e refletem quem nós somos.

COM A IDADE, OS NOSSOS LÁBIOS MUDAM SIGNIFICATIVAMENTE

Perdem volume, definição e proporções. Até a mais pequena mudança, de tamanho ou volume, pode afetar a harmonia do nosso rosto, afetando consequentemente a nossa confiança e autoestima.



**Os nossos lábios são a
nossa identidade, até a mais
pequena alteração tem impacto
na expressão do nosso rosto.**

O que os seus LÁBIOS dizem sobre? **si!**



A MORFOPSIKOLOGIA DOS LÁBIOS

Quer sejam volumosos ou finos, em formato coração, redondo ou oval, existem diferentes tipos de lábios assim como existem diferentes tipos de rostos. O formato dos seus lábios revela os traços da nossa personalidade.



Volúmosos,
redondos
Ovais
finos
em forma de coração...

Os Laboratoires FILLMED *apresentam* a solução para desenhar os seus lábios: LIP MENU




“

Todos os dias mudamos a aparência dos nossos lábios consoante um estilo particular ou uma ocasião especial, tal como fazemos com o nosso cabelo e acessórios. Umhas vezes queremos destacar os nossos lábios, outras torná-los mais neutros. E, por vezes, até queremos “enganar”, tornando-os mais volumosos ou corrigindo pequenos defeitos.

LÁBIOS VOLUMOSOS OU MAIS DEFINIDOS SÃO OS MAIS REQUISITADOS NA MEDICINA ESTÉTICA

Como os nossos lábios refletem a nossa personalidade, os Laboratoires FILLMED conceberam diferentes produtos para que o seu médico lhe possa oferecer o tratamento certo, adaptado às suas necessidades, proporções e caráter. Cada pessoa é única, bem como o seu sorriso!

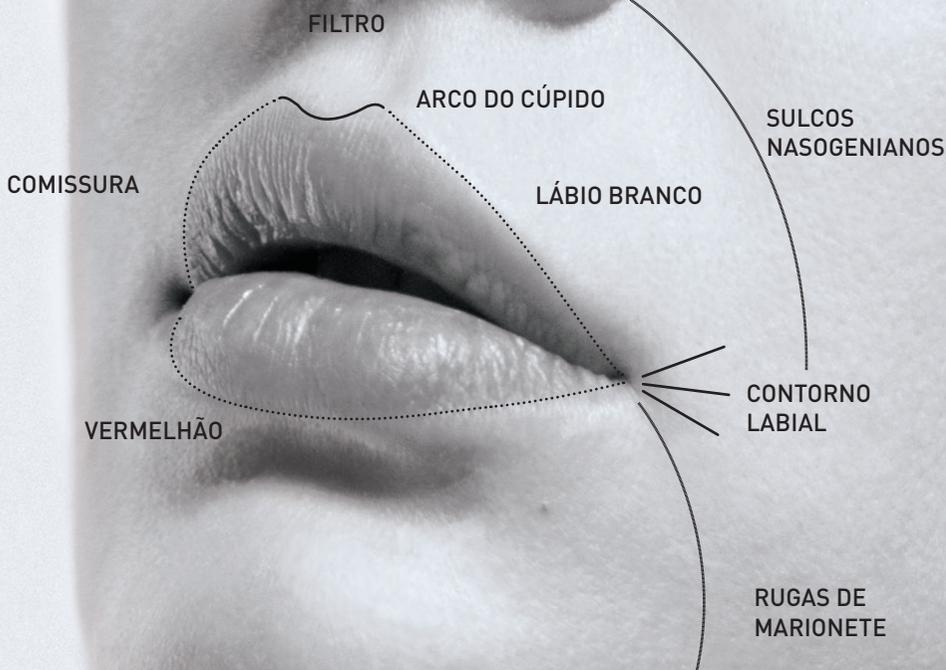

Qual é
a sua escolha?⁽¹⁾
ART FILLER® LIPS
ou **ART FILLER®**
LIPS SOFT?

(1) Fale com o seu médico e descubra o tratamento mais adequado para si.



LÁBIOS DISCRETOS E DELICADOS

Quer realçar os seus lábios de forma suave e subtil? Quer redefinir o contorno da sua boca?

Descubra o SEU ESTILO



ART FILLER® | 
LIPS SOFT

PARA QUEM?

- Para quem tenha lábios pequenos e queira um **efeito lifting moderado**.
- Para quem, com o passar dos anos, tenha ficado com os lábios mais finos e queira **redefinir e recuperar o seu volume**.
- Pessoas que já tenham um bom volume de lábios e **queiram acentuá-lo ligeiramente**.

A SOLUÇÃO DOS LABORATOIRES FILLMED?

CONTORNO E VOLUME MUITO SUAVE

Alisar e esculpir são as prioridades para redefinir os lábios de forma subtil.

ART FILLER® LIPS SOFT

é um produto injetável à base de ácido hialurónico⁽²⁾,
uma substância presente naturalmente no nosso organismo.

[2] Os fillers dos Laboratoires FILLMED são constituídos apenas por ácido hialurónico obtido por biossíntese. Não tem origem animal.

Descubra o SEU ESTILO



ART FILLER® | LIPS 

PARA QUEM?

- Para quem prefere a filosofia de “mais é mais”: **mais volume e mais glamour.**
- Para quem tenha uma **perda significativa de volume e de projeção.**
- Para quem procure uma **boca mais sofisticada e com volume generoso.**
- Para quem queira **esculpir o terço médio do rosto.**

A SOLUÇÃO DOS LABORATOIRES FILLMED?

FORMA E VOLUME

Volumizar e esculpir, para uma projeção e um bonito aumento dos lábios.

ART FILLER® LIPS

é um produto injetável, à base de ácido hialurônico, uma substância presente naturalmente no nosso organismo.⁽²⁾

[2] Os fillers dos Laboratoires FILLMED são constituídos apenas por ácido hialurônico obtido por biossíntese. Não tem origem animal.



“

O SEU ESTILO DE LÁBIOS: AMBICIOSO E VOLUPTUOSO

Quer uns lábios
mais preenchidos
e mais glamorosos?

”

Antes/depois fotografias

PACIENTE COM 36 ANOS DE IDADE



DEPOIS DE ART FILLER® LIPS SOFT / ZONA DE INJEÇÃO: VERMELHÃO

Antes/depois fotografias

PACIENTE COM 57 ANOS DE IDADE



DEPOIS DE ART FILLER® LIPS SOFT / ZONA DE INJEÇÃO: VERMELHÃO E RUGAS PERIORAIS

Antes/depois fotografias




PACIENTE COM 26 ANOS DE IDADE



DEPOIS DE ART FILLER® LIPS / ZONA DE INJEÇÃO: LÁBIO INFERIOR

Antes/depois fotografias

PACIENTE COM 34 ANOS DE IDADE

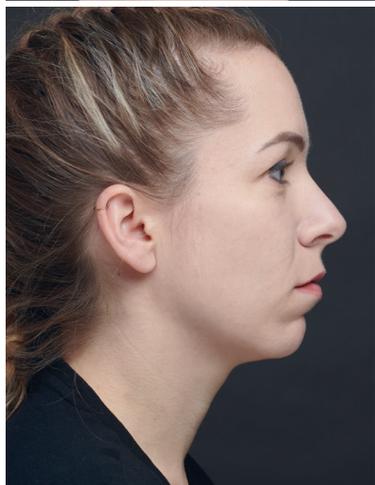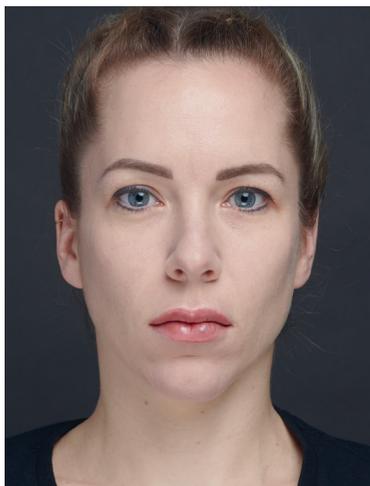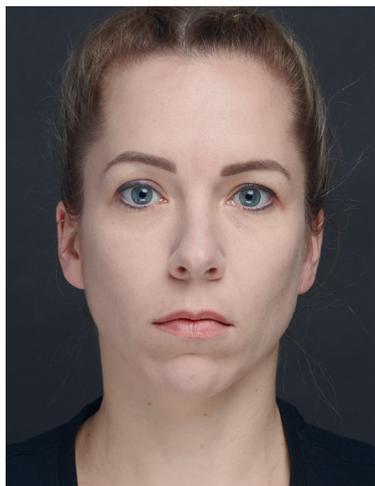

DEPOIS DE ART FILLER® LIPS / ZONA DE INJEÇÃO: VERMELHÃO



O meu diário
lip filler

DIA -15



Planear a consulta com o meu médico.

Fale com o seu médico sobre o que deseja e sobre as suas expectativas. O seu médico irá analisar as proporções do seu rosto e proporcionar-lhe o tratamento mais adequado, escolhendo entre ART FILLER® LIPS SOFT ou ART FILLER® LIPS. Também lhe vai explicar os benefícios e riscos das injeções com os fillers.

DIA -3

Preparação antes da injeção!

Três dias antes das injeções, siga cuidadosamente as instruções do seu médico, como por exemplo: evitar tomar Aspirina, Vitamina C, Vitamina E...

O GRANDE DIA

Vou fazer o meu filler!

Pare de beber café/chá umas horas antes da injeção. Não utilize maquilhagem 12h após a injeção. Evite tocar ou esfregar a zona tratada. Evite a exposição a temperaturas extremas (sauna, hammam...) bem como exposição prolongada ao sol ou raios UV, durante 2 semanas após a injeção.

DIA 2/3/4



Inchaço! Hematomas?

As reações normais após qualquer injeção (inchaço, hematoma, dor)^[3] podem durar alguns dias. Esclareça as suas dúvidas com o seu médico.

DIA 7

Começo a habituar-me aos meus novos lábios e adoro-os!

Agora pode relaxar e aproveitar os seus lábios. Não terá mais inchaços, nem hematomas, nem dor.^[3]

DIA 15



Adoro os meus lábios e estou confiante para o futuro!

A correção dos lábios pode durar entre 12^[4] a 18^[5] meses, dependendo do estilo de vida e da quantidade injetada. Assim que os efeitos deixem de ser visíveis, vai começar a considerar uma nova injeção.

[3] Se as reações adversas persistirem, fale com o seu médico.

[4] Relatórios adicionais sobre a duração dos efeitos de ART FILLER® FINE LINES e ART FILLER® UNIVERSAL (AF1) Ago. 2019.

[5] Relatórios adicionais sobre a duração dos efeitos de ART FILLER® VOLUME e ART FILLER® LIPS (AF2), Ago. 2019

Perguntas frequentes **sobre** **preenchimento** *dos lábios*

OS PROCEDIMENTOS SÃO DOLOROSOS?

Para tornar as injeções mais confortáveis, tanto ART FILLER® LIPS SOFT como ART FILLER® LIPS contêm lidocaína, um analgésico que irá tornar a área a injetar menos sensível.

QUANTO TEMPO DURA UM PREENCHIMENTO?

A duração dos preenchimentos depende de vários fatores, idade, quantidade de produto injetado, área tratada, condição da pele e estilo de vida. O seu médico poderá recomendar uma sessão adicional, se necessário. Uma sessão de seguimento poderá ser necessária para atingir os resultados pretendidos.

EU QUERO OS MESMOS LÁBIOS QUE OS DO FILTRO DO INSTAGRAM

Apesar de tentador, não é realista... Fale com o seu médico sobre aquilo que deseja. O melhor resultado para corrigir os seus lábios é com base na anatomia do seu rosto e boca. Confie na experiência do seu médico. Todos os tratamentos médicos podem ter efeitos indesejáveis.

SE EU PARAR O TRATAMENTO, OS MEUS LÁBIOS FICAM PIORES DO QUE ESTAVAM?

Não! Os seus lábios irão regressar ao volume original. Mas a maioria das pessoas habitua-se aos resultados dos tratamentos e esquece-se de como eram os seus lábios originais. Tire fotografias antes dos tratamentos para acompanhar a evolução!





A BELEZA É UMA ARTE, NÓS FAZEMOS DELA UMA CIÊNCIA

Laboratórios FILLMED – Marca registada – Rua Luz de Almeida nº1C-1D, - 1500-473, Lisboa – Tel.: 211 396 323 – www.fillmed.com

ART FILLER® é uma gama de dispositivos médicos injetáveis. Peça informações ao seu médico. Se ocorrer alguma reação adversa, por favor informe o seu médico. Contacto de vigilância: vigilance@fillmed.com